



Glooko Transmitter

Οδηγίες χρήσης – για χρήστες Glooko

Περιεχόμενα

Εύρεση της συσκευής σας.....	4-5
Γενικές Πληροφορίες	6
Σχετικά με το Glooko	6
Προβλεπόμενη χρήση	6
Ανтенδείξεις	6
Προειδοποιήσεις	6
Προφυλάξεις	6
Απαιτήσεις συσκευής.....	6
Γρήγορα αποτελέσματα.....	7
Καθαρισμός του Glooko Transmitter	7
Οδηγίες απόρριψης	7
Γρήγορες συμβουλές.....	7
Εγκατάσταση του Glooko Transmitter	8
Εγκατάσταση χωρίς κουτί καλωδίων.....	8
Εγκατάσταση με κουτί καλωδίων.....	8
Σύνδεση συσκευής διαβήτη	9
Μεταφόρτωση δεδομένων.....	9
Πρόσθετες πληροφορίες	10
Ρυθμίσεις Ethernet	10
Συμβατές συσκευές και μέθοδοι μετάδοσης	11

Εύρεση της συσκευής σας



Μετρητής γλυκόζης



CGM




Αντλία ινσουλίνης



Πένα ινσουλίνης


Abbott

	FreeStyle Freedom Lite.....	11
	FreeStyle InsuLinx	11
	FreeStyle Lite	11
	FreeStyle Optium Neo.....	11
	FreeStyle Precision Neo.....	11
	Precision Xtra	11
	Precision Xceed.....	11


Abbott

	FreeStyle Libre Reader	11
---	------------------------------	----

Acon Laboratories

	On Call® Advanced.....	12
	On Call® Express	12
	On Call® Express II	12
	On Call® Express Mobile.....	19
	On Call® Express Voice.....	12
	On Call® Extra	12
	On Call® Extra Mobile.....	19
	On Call® Extra Voice.....	12
	On Call® Plus.....	12
	On Call® Resolve	12
	On Call® Sure.....	12
	On Call® Sure Sync	12
	On Call® Vivid	12

AgaMatrix

	WaveSense Jazz™	12
	Ally BGK.....	12
	Ally BGM.....	12


Animas

	OneTouch Ping (meter)	12
---	-----------------------------	----


Animas

	OneTouch Ping (pump).....	20
	Vibe.....	20
	Vibe Plus	20

Arkray

	GlucoCard 01	12
	GlucoCard Expression.....	12
	GlucoCard Shine.....	12
	GlucoCard Vital	12
	GlucoCard Shine Connex	12
	GlucoCard Shine Express	12
	GlucoCard Shine XL	12

Ascensia (Bayer)

	Breeze 2	13
	Contour.....	13
	Contour Care.....	13
	Contour Fit.....	13
	Contour Link.....	13
	Contour Next	13
	Contour Next (Bluetooth).....	13
	Contour Next Gen	13
	Contour Next One	13
	Contour Next EZ	13
	Contour Next Link.....	13
	Contour Next Link 2.4.....	13
	Contour Next USB.....	13
	Contour Plus	13
	Contour Plus Blue	13
	Contour Plus Elite.....	13
	Contour Plus One.....	13
	Contour TS.....	13
	Contour USB	13
	Contour XT.....	13


Beurer

	GL50 evo.....	13
	Beurer GL 44.....	13
	Beurer GL 48.....	13
	Beurer GL 49.....	13


Bionime

	GE100.....	13
	Rightest GM700SB.....	13


Biosys

	VTrust TD-4279D.....	19
---	----------------------	----


Bioseven

	lineaD ORO	13
---	------------------	----


Biochemical Systems

	Aria.....	14
---	-----------	----


Dexcom

	G4 Platinum.....	19
	G4 Platinum with S hare.....	19
	G5	19
	Touchscreen Receiver (G5/G6)	19
	G6 Receiver.....	19
	G7 Receiver.....	19
	One Receiver.....	19
	One+ Receiver	19


Ekoweb

	GlucoX (TD-4183).....	14
	GlucoX Pro (TD-4183)	14


Embrace

	TALK.....	14
---	-----------	----


Equil/Wellion

	MICRO-pump.....	20
---	-----------------	----

Exacta

	Glance	14
---	--------------	----

ForaCare

	Diamond Mini DM30.....	19
	Diamond PRIMA.....	14
	FORA 6 Connect.....	19
	FORA GD40.....	19


GlucorX

	HCT.....	14
	Nexus.....	14
	Nexus Mini.....	14
	Nexus Blue.....	19
	Smart.....	14
	Q.....	14


Glucosmart

	Salsa.....	14
	Salsa Connect	14
	Salsa Connect (BLE).....	19

GlucOX

	TD-4183	14
---	---------------	----

i-SENS

	Alphacheck Professional	15
	CareSens BGM/TEE2.....	15
	CareSens Dual.....	15
	CareSens H Beat	15
	CareSens N.....	15
	CareSens N Feliz	15
	CareSens N POP	15
	CareSens N Voice	15
	CareSens N Premier	15
	CareSens N Premier Carelight	15
	CareSens Pro.....	15
	CareSens S Fit.....	15
	No Coding Plus.....	15
	TEE2+.....	15

	Infopia	
	Fintetest Lite.....	15
	GlucoLab.....	15

	Insulet	
	Omnipod® System.....	20
	Omnipod® Dash™ System.....	20

	Intuity	
	POGO® Automatic™.....	15


	LifeScan	
	OneTouch Select Plus.....	15
	OneTouch Ultra.....	15
	OneTouch Ultra2.....	15
	OneTouch UltraEasy.....	15
	OneTouch UltraMini.....	15
	OneTouch Ultra Plus Reflect.....	15
	OneTouch Verio.....	15
	OneTouch Verio Flex.....	15
	OneTouch Verio IQ.....	15
	OneTouch Verio Reflect.....	15
	OneTouch Verio Sync.....	15

	Medtronic	
	630G.....	20
	640G.....	20
	670G.....	20

	Menarini	
	GLUCOCARD G+.....	16
	GLUCOCARD SM.....	16
	GlucoFix Tech.....	16
	GlucoFix Tech GK.....	19
	Glucomen areo.....	16
	Glucomen areo GK.....	19
	Glucomen areo 2K.....	16
	Glucomen LX2.....	16


	Nipro	
	4SURE Smart.....	16
	4SURE Smart Duo.....	16

	Neon	
	GK+.....	19

	NovoNordisk	
	NovoPen® 6.....	22
	NovoPen Echo® Plus.....	22

	Palmdoc	
	1.....	17
	2.....	17
	Smart.....	17

	Prodigy	
	AutoCode.....	17

	ReliOn	
	Confirm.....	16
	Platinum.....	16
	Premier Blu.....	16
	Premier Classic.....	16
	Premier Voice.....	16
	Prime.....	16

	Roche	
	Accu-Chek Active.....	17
	Accu-Chek Aviva Combo.....	18
	Accu-Chek Aviva Connect.....	17
	Accu-Chek Aviva Expert.....	18
	Accu-Chek Aviva Insight.....	21
	Accu-Chek Aviva Nano.....	18
	Accu-Chek Aviva Plus Black.....	18
	Accu-Chek Aviva Plus Silver.....	18
	Accu-Chek Compact.....	18
	Accu-Chek Compact Plus.....	18
	Accu-Chek Guide.....	17
	Accu-Chek Guide Me.....	17
	Accu-Chek Instant.....	17
	Accu-Chek instant S.....	17
	Accu-Chek Mobile (USB).....	17
	Accu-Chek Nano.....	18
	Accu-Chek Performa.....	18
	Accu-Chek Performa Connect.....	17
	Accu-Chek Performa Insight.....	21
	Accu-Chek Performa Nano.....	18

	Roche	
	Accu-Chek Aviva Insight.....	21
	Accu-Chek Performa Insight.....	21
	Accu-Chek Spirit Combo.....	21
	Accu-Chek Aviva Solo.....	20
	Accu-Chek Guide Solo.....	20

	Sanofi	
	BGStar.....	17
	MyStar Extra.....	17

	Tandem	
	t:flex.....	20
	t:slim.....	20
	t:slim X2.....	20
	t:slim G4.....	20

	Taidoc	
	TD-4141.....	16
	TD-4183.....	16
	TD-4216B.....	16
	TD-4255.....	16
	TD-4257(v1).....	16
	TD-4257(v2).....	16
	TD-4280.....	16
	TD-4285.....	16
	TD-4289.....	16

	Terumo	
	Medisafe Fit Smile.....	19

	Terumo	
	Medisafe WITH.....	22

	Trividia (Nipro)	
	TRUE METRIX.....	16
	TRUE METRIX AIR.....	16
	TRUEresult.....	16
	TRUEyou mini.....	16

	ViCentra	
	Kaleido.....	20

	Wellion	
	Calla Dialog.....	17
	Calla Light.....	17
	Calla Mini.....	17
	Galileo Compact.....	17
	Galileo GLU/KET.....	17
	Leonardo GLU/KET.....	17
	Leonardo Compact.....	17
	Newton.....	17

	XPER Technology	
	A1 (TD-4183).....	17

	Ypsomed	
	MyLife Aveo.....	17

Γενικές πληροφορίες

Σχετικά με την Glooko

Η Glooko προσφέρει στους πάροχους υγειονομικής περίθαλψης μια online λύση που συλλέγει και αποθηκεύει κεντρικά τα δεδομένα όλων των ασθενών με διαβήτη, χωρίς να ανησυχούν για οποιαδήποτε εγκατάσταση λογισμικού. Ανεξάρτητα από το εάν η συσκευή μεταδίδει χρησιμοποιώντας ενσύρματη σύνδεση ή σύνδεση υπερύθρων, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται θα εμφανίζονται αμέσως online σε έναν ασφαλή λογαριασμό της Glooko. Όλα τα δεδομένα από πολλές συσκευές θα ενοποιούνται και θα παρουσιάζονται σε μία αναφορά.

Προβλεπόμενη χρήση

Το Glooko Transmitter ενδείκνυται για χρήση από επαγγελματίες υγείας σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης για τη μεταφορά προκαθορισμένων δεδομένων από συσκευές παρακολούθησης στο σπίτι σε μια βάση δεδομένων διακομιστή.

Αντενδείξεις

Καμία γνωστή.

Προειδοποίηση!

Το Glooko δεν μετρά, δεν ερμηνεύει και δεν λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τα δεδομένα που μεταφέρει, ούτε προορίζεται να παρέχει αυτοματοποιημένες αποφάσεις θεραπείας ή να αντικαθιστά την κρίση ενός επαγγελματία υγείας. Όλες οι ιατρικές διαγνώσεις και οι θεραπείες πρέπει να εκτελούνται υπό την επίβλεψη και την παρακολούθηση κατάλληλου παρόχου υγειονομικής περίθαλψης.

Όλες οι ιατρικές διαγνώσεις και οι θεραπείες των ασθενών πρέπει να εκτελούνται υπό την επίβλεψη ειδικευμένων επαγγελματιών υγείας! Το Glooko δεν προορίζεται να παρέχει αυτοματοποιημένες αποφάσεις θεραπείας ή να αντικαθιστά την κρίση του επαγγελματία υγείας για το περιστατικό. Το Glooko δεν προορίζεται για κλήσεις έκτακτης ανάγκης ή για μετάδοση ή ένδειξη συναγερμών σε πραγματικό χρόνο ή χρονικά κρίσιμων δεδομένων! Το Glooko δεν προορίζεται ως υποκατάστατο της απευθείας ιατρικής παρακολούθησης ή της επείγουσας παρέμβασης.

Προφυλάξεις

- Μην εμβυθίζετε και μην υποβάλετε το Glooko Transmitter σε υγρό. Τα υγρά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο Glooko Transmitter.
- Το Glooko Transmitter είναι επαναχρησιμοποιήσιμο. Σε περίπτωση που το Glooko Transmitter εμφανίσει σημάδια ζημιάς (όπως φθαρμένα καλώδια ή υποβάθμιση υλικού), επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών.

Απαιτήσεις συσκευής

Απαιτείται λογαριασμός Glooko για την αποθήκευση δεδομένων που μεταφέρονται από το Glooko Transmitter. Ο αρχικός Λογαριασμός Διαχειρ. για την Κλινική δημιουργείται από την ομάδα υποστήριξης Glooko. Μπορούν να δημιουργηθούν επιπλέον ατομικοί λογαριασμοί από τον Διαχειριστή στην Κλινική χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Web Glooko. Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη του Glooko για κλινικές για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή Web Glooko.

Γρήγορα αποτελέσματα

Θα χρειαστείτε:

1. Συμβατός μετρητής γλυκόζης αίματος, συμβατή πένα ινσουλίνης, συμβατή αντλία ινσουλίνης ή συμβατή συσκευή συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM),
2. Glooko Transmitter,
3. Έναν λογαριασμό Glooko με πρόσβαση στη λειτουργία παρακολούθησης πληθυσμού,
4. Το καλώδιο μεταφόρτωσης δεδομένων της συσκευής το οποίο αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη συσκευή μέτρησης διαβήτη. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά τα καλώδια δεν παρέχονται από την Glooko. Εάν λείπει ένα συγκεκριμένο καλώδιο, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.

Καθαρισμός του Glooko Transmitter


Για να καθαρίσετε το Glooko Transmitter, χρησιμοποιήστε ένα πανάκι με μικροΐνες για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη ή σωματίδια. Μην υποβάλετε το Glooko Transmitter σε υγρά.

Οδηγίες απόρριψης

Να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Γρήγορες συμβουλές

- Δεν υπάρχει σύνδεση δικτύου; Δοκιμάστε να μετακινήσετε το Glooko Transmitter σε μια νέα θέση εντός της κλινικής σας. Σκεφτείτε πού θα είναι πιο ισχυρή η λήψη σήματος κινητής τηλεφωνίας.
- Η συσκευή δεν κάνει μεταφόρτωση; Βεβαιωθείτε ότι το Glooko Transmitter εμφανίζει την ένδειξη "Έτοιμο για μεταφορά" πριν συνδέσετε τη συσκευή διαβήτη.

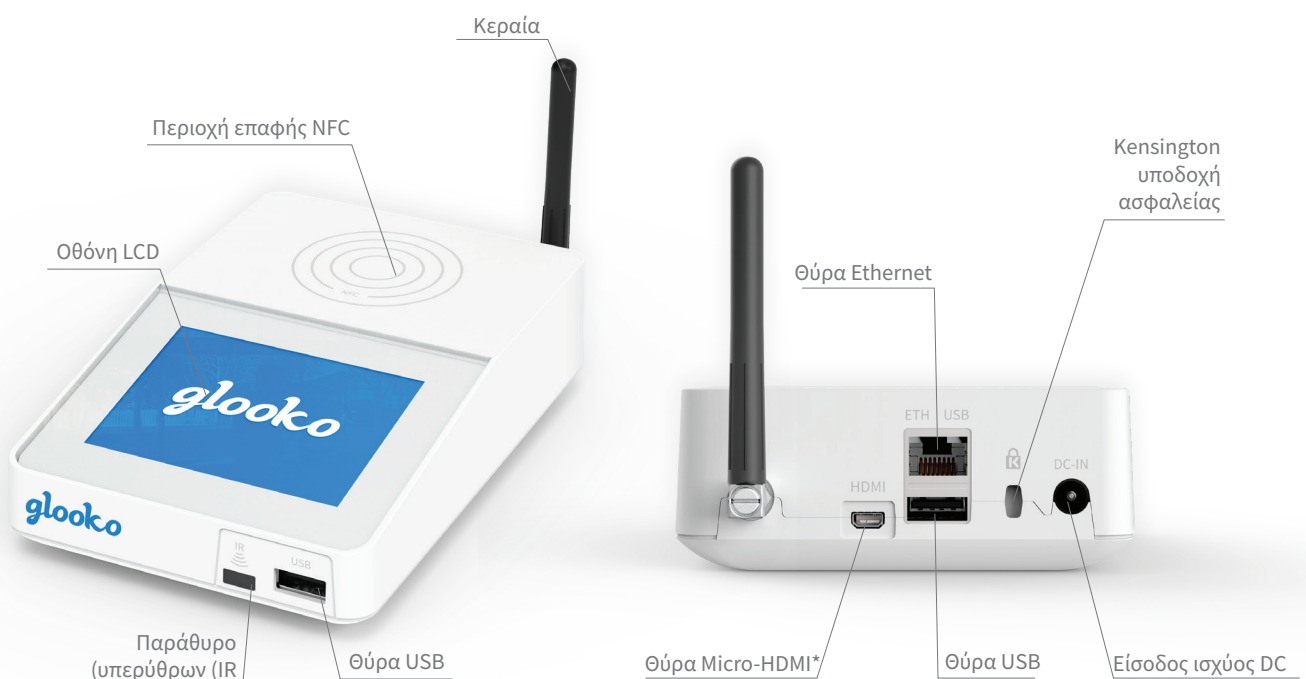


* Η θύρα Micro-HDMI είναι απενεργοποιημένη.

Εγκατάσταση του Glooko Transmitter

Εγκατάσταση χωρίς κουτί καλωδίων

1A

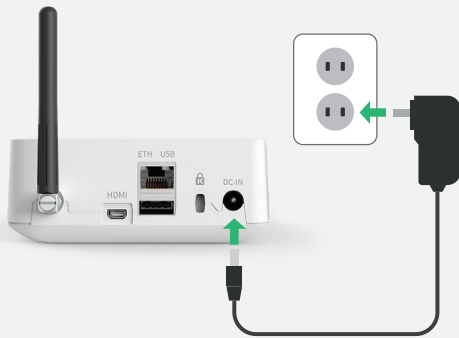

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό, όπως φαίνεται παραπάνω, και συνδέστε το σε μια πρίζα.


2A Εκκίνηση



1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
2. Το μήνυμα "Έτοιμο για μεταφορά" θα εμφανιστεί όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Εγκατάσταση με κουτί καλωδίων

1B Σύνδεση Glooko Transmitter και διανομέα USB

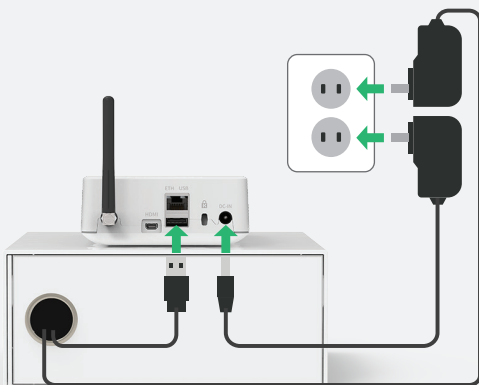

1. Τοποθετήστε τον διανομέα USB μέσα στο κουτί καλωδίων.
2. Συνδέστε τον διανομέα USB στο Glooko Transmitter (χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB) και συνδέστε το τροφοδοτικό του σε μια πρίζα.
3. Τοποθετήστε το Glooko Transmitter πάνω στο κουτί καλωδίων. Συνδέστε το τροφοδοτικό του, όπως φαίνεται παραπάνω, και συνδέστε το σε μια πρίζα.

2B Εκκίνηση



1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
2. Το μήνυμα "Έτοιμο για μεταφορά" θα εμφανιστεί όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

i Σημείωση: Αν θέλετε να συνδέσετε το Glooko Transmitter στο Internet χρησιμοποιώντας Ethernet (αντί για την ενσωματωμένη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας). Συνδέστε το καλώδιο Ethernet και το Glooko Transmitter θα ρυθμιστεί μόνο του. Για περαιτέρω οδηγίες, δείτε τη σελίδα 10.

3 Σύνδεση συσκευής διαβήτη



Κάθε συσκευή διαβήτη συνδέεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- Καλώδιο USB (θύρα USB ή διανομέας USB)
- Υπέρυθρες (ενσωματωμένος δέκτης υπερύθρων ή για ορισμένες συσκευές ένα καλώδιο SmartPix).
- NFC (Επικοινωνία κοντινού πεδίου)
- BLE (Bluetooth χαμηλής ενέργειας)


4 Μεταφόρτωση δεδομένων



Ακολουθήστε τις συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς γίνεται η μεταφόρτωση για όλες τις συμβατές συσκευές διαβήτη στη σελίδα 11-19.

Η μεταφορά ολοκληρώνεται όταν η οθόνη γίνει πράσινη.

5 Σύνδεση στον λογαριασμό σας Glooko

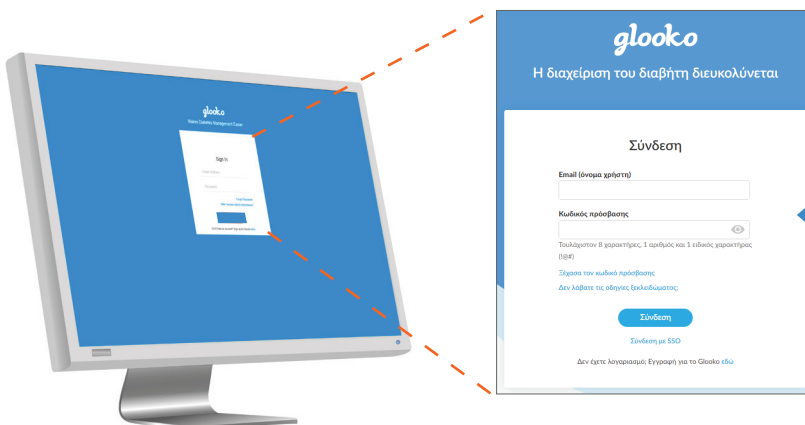


Μεταβείτε στο <https://my.glooko.com> για να συνδεθείτε στη δική σας λειτουργία παρακολούθησης πληθυσμού.

Μεταβείτε στην καρτέλα Εκχώρηση συσκευών για να ανακτήσετε τα δεδομένα που έχουν μεταφορτωθεί.




Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Glooko Transmitter, ανατρέξτε στο έγγραφο: [Glooko για κλινική χρήση- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης](https://support.glooko.com) στον ιστότοπο <https://support.glooko.com>


Πρόσθετες πληροφορίες

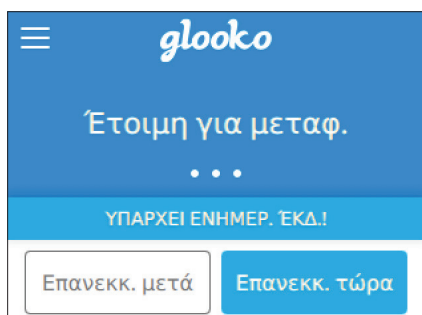

Εάν υπάρχει ενημερωμένη έκδοση, μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε επανεκκίνηση αμέσως. Διαφορετικά, το Glooko Transmitter θα ενημερωθεί αυτόματα μετά από 10 ώρες.

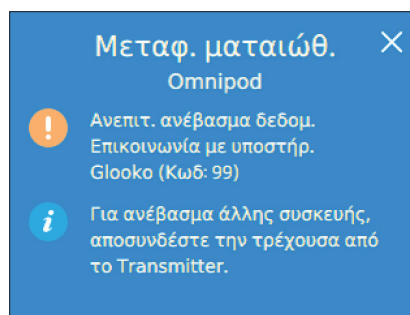


Εάν η διαδικασία μεταφόρτωσης αποτύχει, θα ειδοποιηθείτε. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

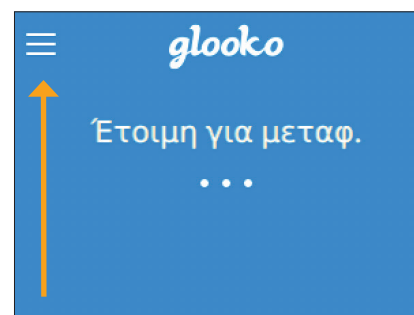


Περισσότερες λειτουργίες είναι διαθέσιμες πατώντας το εικονίδιο μενού.


Μεταφορά συσκευών Bluetooth

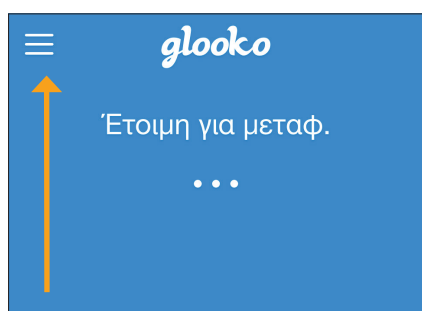

Ανοίξτε το μενού Glooko Transmitter πατώντας το εικονίδιο μενού.

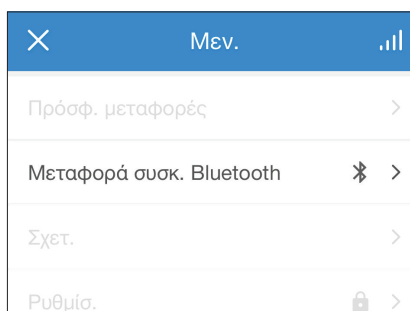

Επιλέξτε «Μεταφορά συσκευής Bluetooth».

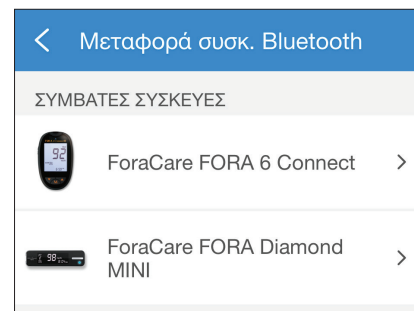

Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να μεταφέρετε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.


Ρυθμίσεις Ethernet

Κατά τη σύνδεση ενός καλωδίου Ethernet, το Glooko Transmitter θα προσπαθήσει αυτόματα να συνδεθεί στο Internet μέσω Ethernet.

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της σύνδεσης Ethernet με μη αυτόματο τρόπο ή να διαβάσετε τη διεύθυνση MAC, επιλέξτε:

Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δικτύου > Ρυθμίσεις Ethernet

Εάν το ρυθμισμένο δίκτυο Ethernet δεν είναι διαθέσιμο, το Glooko Transmitter θα επανέλθει αυτόματα στη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας.

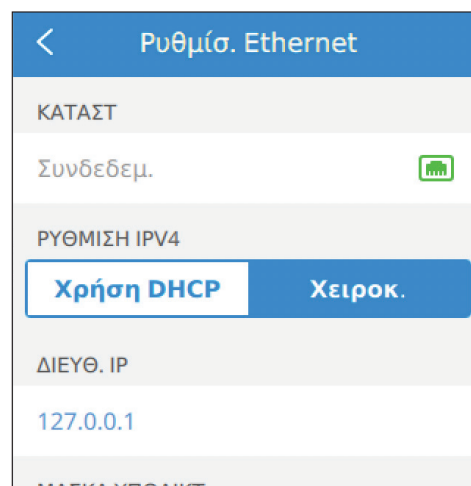

Συμβατές συσκευές και μέθοδοι μετάδοσης

Ακολουθούν οδηγίες για το πώς να μεταφορτώσετε δεδομένα διαβήτη από μια συμβατή συσκευή χρησιμοποιώντας το Glooko Transmitter. Εκτός εάν παρέχονται σαφείς οδηγίες αποστολής για τη συσκευή, απλά πρέπει να τη συνδέσετε με το Transmitter ή τον διανομέα USB χρησιμοποιώντας το ειδικό καλώδιο USB ή μέσω υπεράυθρων (IR), Bluetooth ή NFC, και η αποστολή θα γίνει αυτόματα.

Θα χρειαστείτε έναν λογαριασμό Glooko με πρόσβαση στη λειτουργία παρακολούθησης πληθυσμού. Τα δεδομένα που αποστέλλονται χρησιμοποιώντας το Glooko Transmitter θα συγχρονιστούν με τον λογαριασμό σας στη λειτουργία παρακολούθησης πληθυσμού, όπου η πρόσβαση γίνεται με τα στοιχεία σύνδεσης στον επαγγελματικό λογαριασμό σας Glooko. Η πρόσβαση στο Internet (δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεση Ethernet) είναι απαραίτητη για να συγχρονιστούν τα μεταφορτωμένα δεδομένα στον διακομιστή Glooko.

i Το Glooko Transmitter αποστέλλει δεδομένα γλυκόζης από τους μετρητές, τις αντλίες ινσουλίνης και τις συσκευές συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM) που παρατίθενται παρακάτω. Να σημειωθεί ότι ορισμένες από τις συσκευές διαβήτη ενδέχεται να μην διατίθενται στην αγορά σας.

Μετρητές γλυκόζης και CGM - συνδεδεμένοι με καλώδιο USB

i Σημείωση: Εάν έχετε έναν διανομέα USB συνδεδεμένο στο Glooko Transmitter, ο διανομέας USB πρέπει να τροφοδοτείται από το δικό του τροφοδοτικό.



Abbott

FreeStyle Freedom Lite

FreeStyle Lite

Abbott FreeStyle
USB (2.5 mm)



FreeStyle InsuLinx
FreeStyle Libre Reader*

FreeStyle Precision Neo
FreeStyle Optium Neo

Micro USB



Precision Xceed

Precision Xtra


Abbott Xceed USB



*Η συμβατότητα περιορίζεται στη Σουηδία, τη Νορβηγία και τις Η.Π.Α. από την Abbott.


Μετρητές γλυκόζης και CGM - συνδεδεμένοι με καλώδιο USB

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

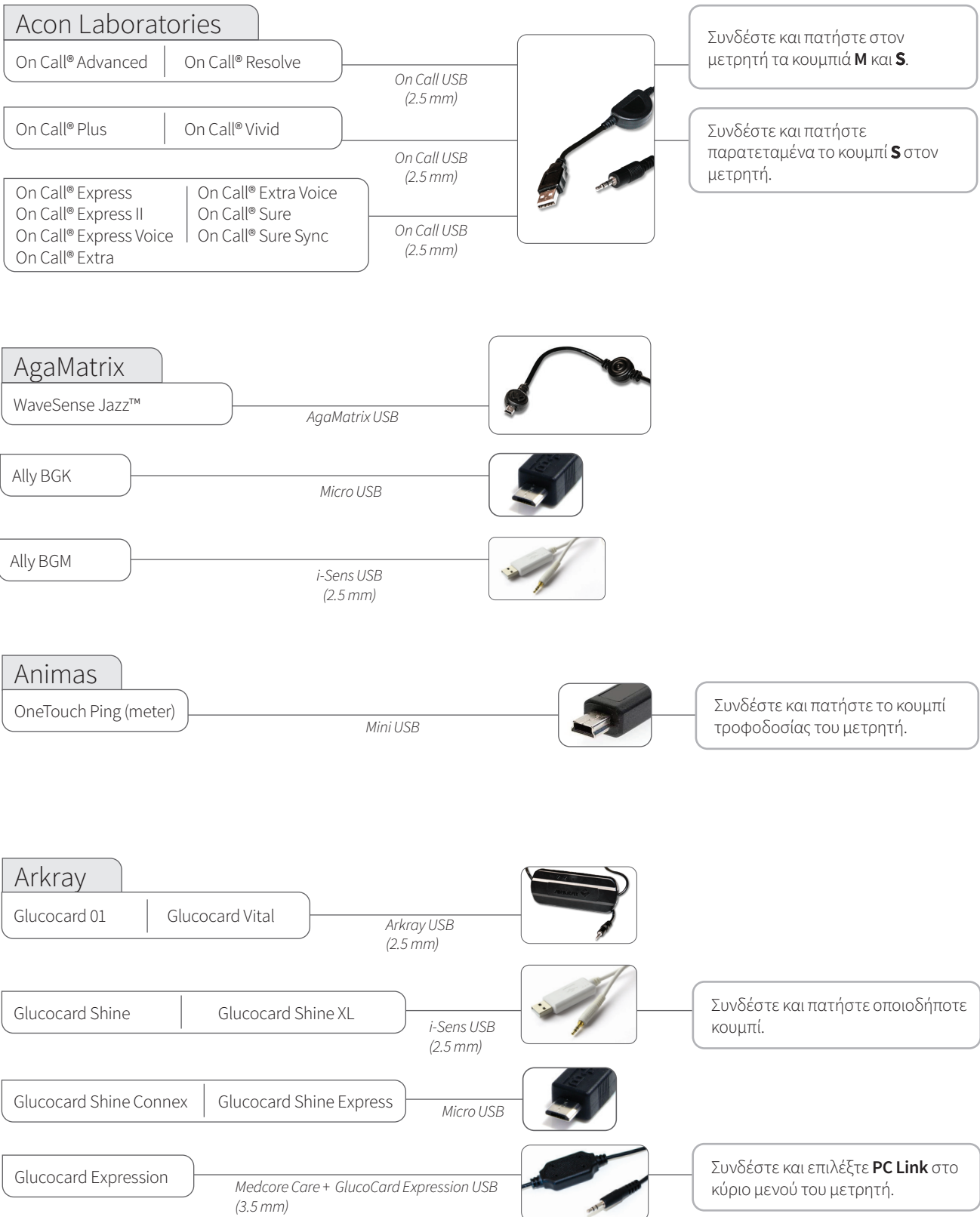


Μετρητές γλυκόζης και CGM - συνδεδεμένοι με καλώδιο USB

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

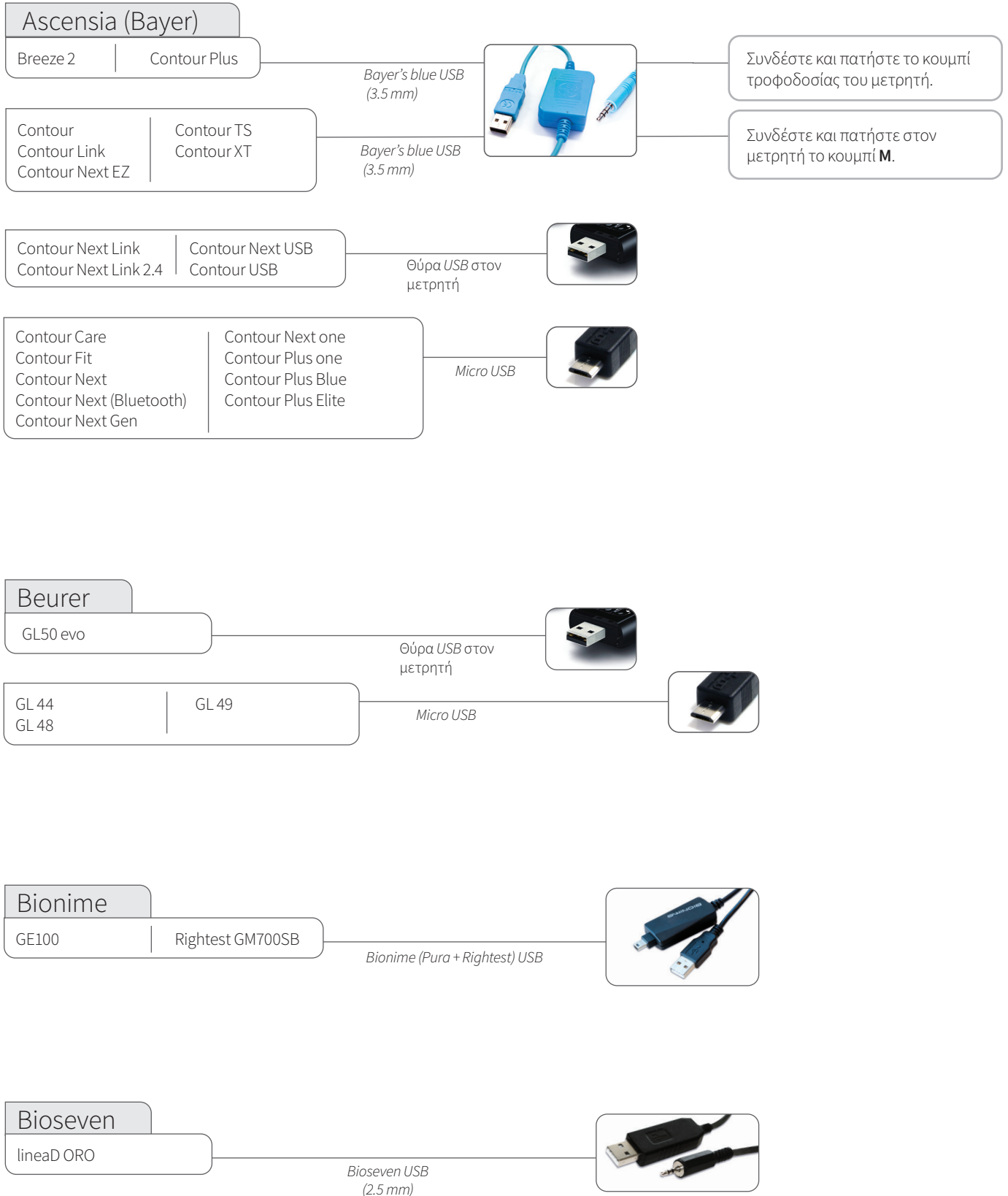

Μετρητές γλυκόζης και CGM - συνδεδεμένοι με καλώδιο USB

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

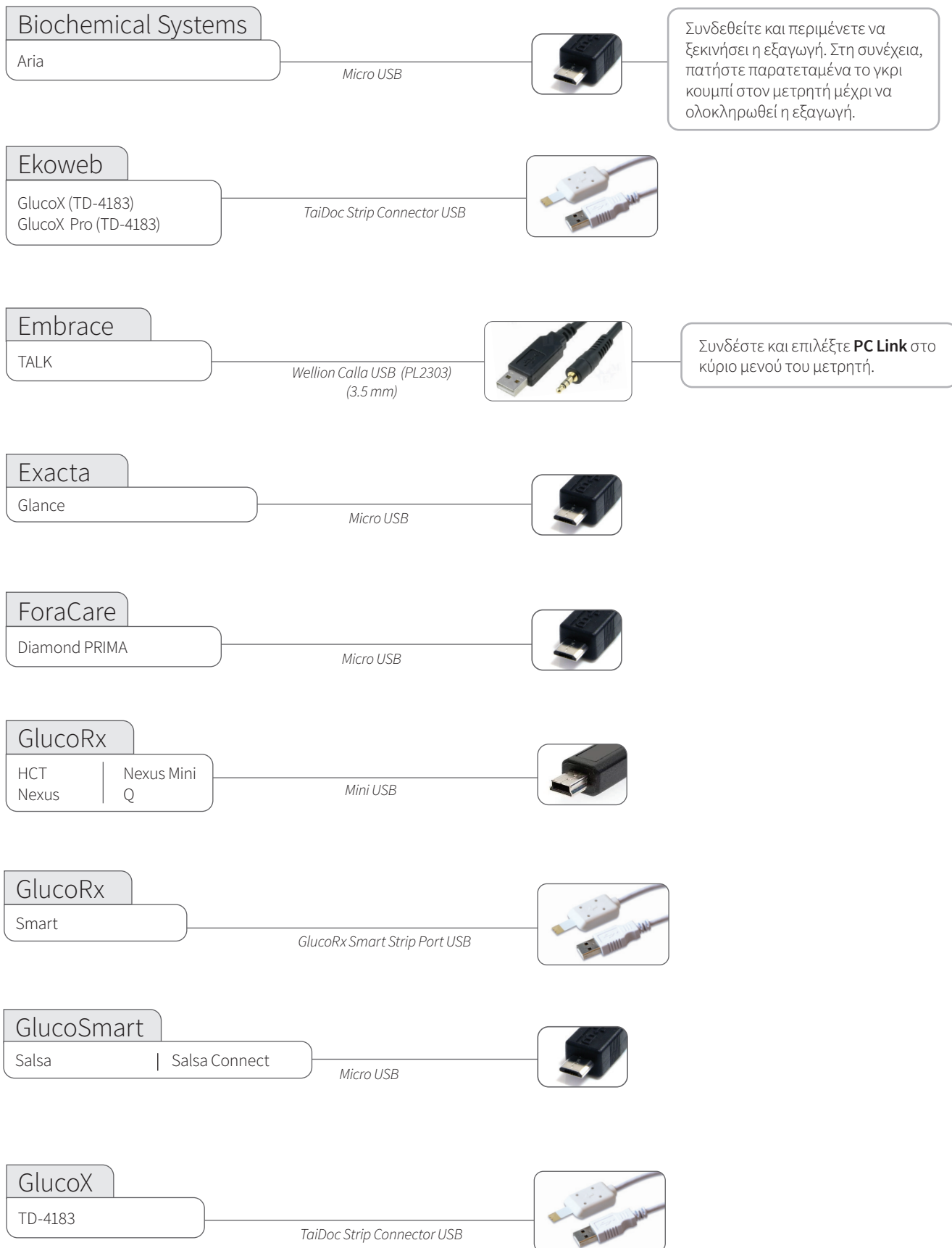

Μετρητές γλυκόζης και CGM - συνδεδεμένοι με καλώδιο USB

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

i-SENS

Alphacheck Professional

Mini USB



Συνδέστε και πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας του μετρητή.

CareSens BGM/Tee2
CareSens Dual
CareSens H Beat
CareSens N
CareSens N POP
CareSens N Premier

CareSens N Premier Carelight
CareSens N Voice
Caresens Pro
CareSens S Fit
CareSens TEE2+
No Coding Plus

i-Sens USB
(2.5 mm)



Συνδέστε και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί **S** του μετρητή (κουμπί **C**).

CareSens N Feliz

Micro USB



Infopia

Finetest Lite

Glucolab

Infopia USB
(2.5 mm)



Intuity

POGO® Automatic™

Micro USB



LifeScan

OneTouch Ultra
OneTouch Ultra2

OneTouch UltraEasy
OneTouch UltraMini

LifeScan USB
(3.5 mm)



Συνδέστε και πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

OneTouch Select Plus
OneTouch Ultra Plus Reflect
OneTouch Verio

OneTouch Verio Flex
OneTouch Verio Reflect

Micro USB



OneTouch Verio IQ


OneTouch Verio Sync

Mini USB





Μετρητές γλυκόζης αίματος – συνδεδεμένοι με καλώδιο USB

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα



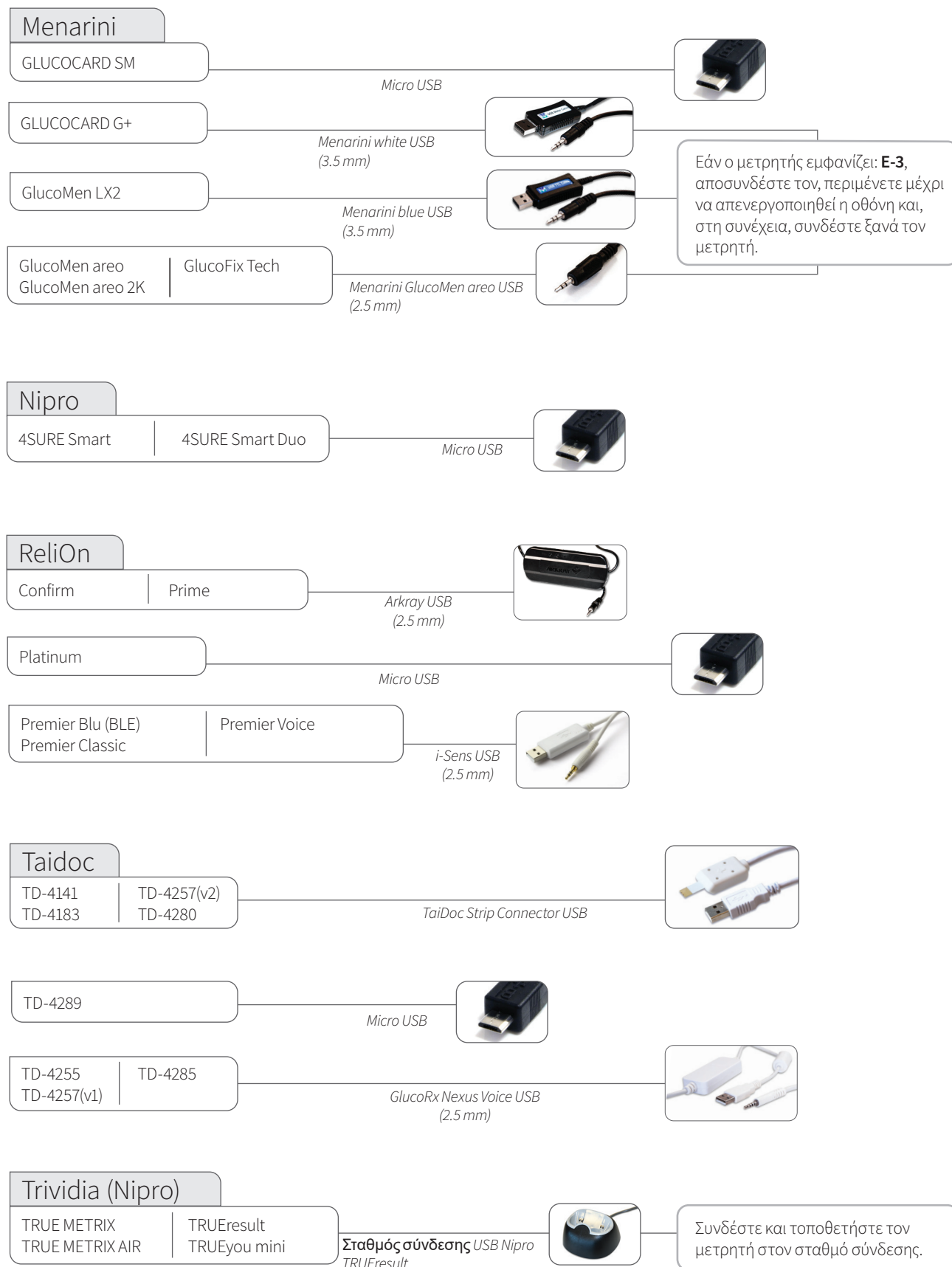


Μετρητές γλυκόζης αίματος – συνδεδεμένοι με καλώδιο USB

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

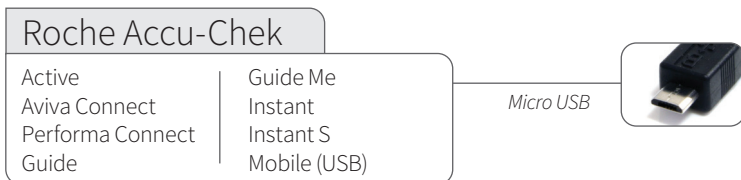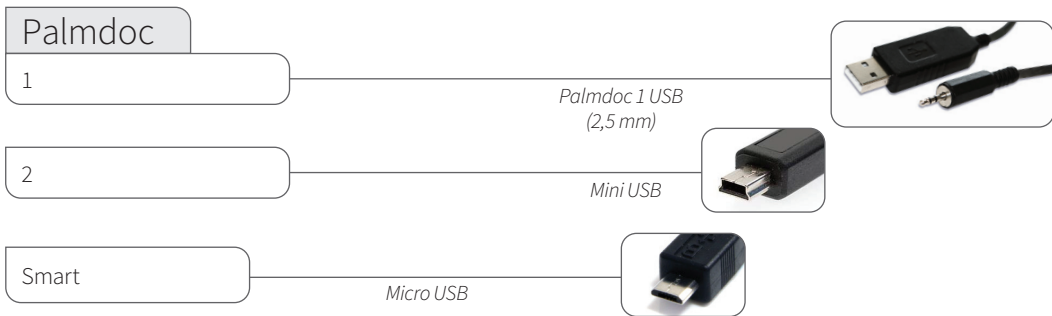

Μόλις συνδεθεί, η μεταφόρτωση θα πρέπει να ξεκινήσει μέσα σε 20 δευτερόλεπτα μετά τη σύνδεση του καλωδίου. Αν όχι, πηγαίnete στο κύριο μενού του μετρητή. Μεταβείτε στις επιλογές **Τα δεδομένα μου > Μεταφορά δεδομένων > Αναφορές** και συνδέστε ξανά τον μετρητή στο καλώδιο USB.
(Μην κρατάτε πατημένα τα κουμπιά με τα βέλη.)

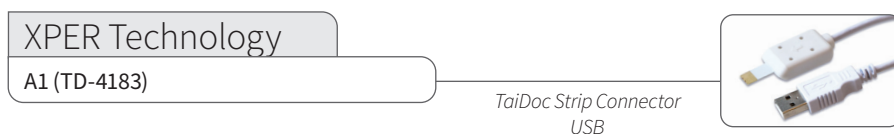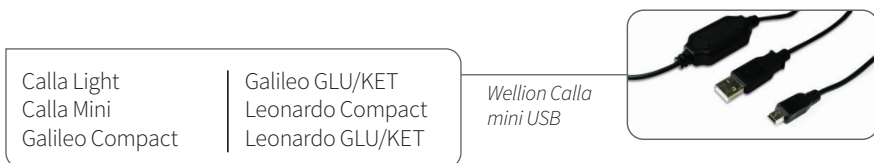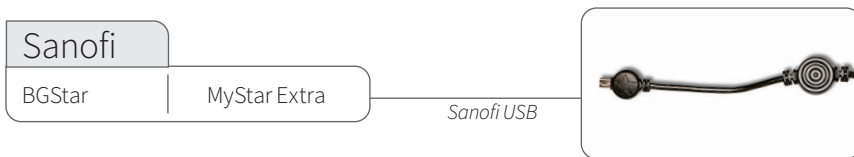

Μετρητές γλυκόζης αίματος - με υπέρυθρη σύνδεση

Παράθυρο υπερύθρων στο Glooko Transmitter

Βάλτε τον μετρητή σε λειτουργία μεταφόρτωσης ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. Τοποθετήστε το επάνω άκρο του μετρητή γλυκόζης με κατεύθυνση προς το παράθυρο υπερύθρων στο Glooko Transmitter.

i Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τη συσκευή εντελώς ακίνητη κατά τη διάρκεια της μεταφόρτωσης. Μην αφαιρείτε τη συσκευή μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη: Έγινε μεταφορά!



Roche Accu-Chek

Aviva Nano
Aviva Plus Black
Aviva Plus Silver
Nano
Performa
Performa Nano



Με τον μετρητή απενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε τη μετάδοση υπερύθρων πατώντας παρατεταμένα τα δύο κουμπιά βέλους μέχρι να εμφανιστούν δύο βέλη στην οθόνη.

Aviva Combo
Aviva Expert



Στο κύριο μενού, μεταβείτε στην επιλογή **Τα δεδομένα μου** και επιλέξτε **Μεταφορά δεδομένων**.

Compact












Ενεργοποιήστε τη μετάδοση υπερύθρων πατώντας και κρατώντας τα δύο επάνω κουμπιά του μετρητή μέχρι να εμφανιστούν δύο βέλη στην οθόνη.

Compact Plus



Ενεργοποιήστε τη μετάδοση υπερύθρων πατώντας παρατεταμένα τα κουμπιά **S** και **M** κάτω από την οθόνη μέχρι να εμφανιστούν δύο βέλη στην οθόνη.

Μετρητές γλυκόζης & συσκευές συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης που είναι συνδεδεμένες μέσω Bluetooth ή NFC


Acon On Call Express Mobile On Call Extra Mobile		Βλ. στη σελίδα 10 τις οδηγίες που αφορούν τη μεταφορά συσκευών Bluetooth.
Biosys Vtrust TD-4279D		Βλ. στη σελίδα 10 τις οδηγίες που αφορούν τη μεταφορά συσκευών Bluetooth.
ForaCare FORA 6 Connect FORA Diamond MINI DM30 FORA GD40h		Βλ. στη σελίδα 10 τις οδηγίες που αφορούν τη μεταφορά συσκευών Bluetooth.
GlucorX Nexus Blue		Βλ. στη σελίδα 10 τις οδηγίες που αφορούν τη μεταφορά συσκευών Bluetooth.
Glucosmart Salsa Connect		Βλ. στη σελίδα 10 τις οδηγίες που αφορούν τη μεταφορά συσκευών Bluetooth.
Menarini GlucoFix Tech GK GlucoMen areo GK		Τοποθετήστε τον μετρητή γλυκόζης στην επιφάνεια NFC πάνω από τον πομπό Glooko και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Neon GK+		Βλ. στη σελίδα 10 τις οδηγίες που αφορούν τη μεταφορά συσκευών Bluetooth.
Taidoc TD-4216B		Βλ. στη σελίδα 10 τις οδηγίες που αφορούν τη μεταφορά συσκευών Bluetooth.
Terumo Medisafe Fit Smile		Τοποθετήστε τον μετρητή γλυκόζης στην επιφάνεια NFC πάνω από τον πομπό Glooko και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

CGM - συνδεδεμένες με καλώδιο USB



Σημείωση: Εάν έχετε έναν διανομέα USB συνδεδεμένο στο Glooko Transmitter, ο διανομέας USB πρέπει να τροφοδοτείται από το δικό του τροφοδοτικό.



Dexcom G4 Platinum G4 Platinum with Share G5 Touchscreen Receiver (G5/G6) G6 Receiver G7 Receiver One Receiver One+ Receiver	 Micro USB	Αν η μεταφόρτωση δεν ξεκινήσει, απουσνδέστε τον δέκτη και επιλέξτε Τερματισμός λειτουργίας στο μενού για να τον απενεργοποιήσετε. Ενεργοποιήστε ξανά τον δέκτη και συνδέστε τον με το Glooko Transmitter.
---	---	---

Αντλίες ινσουλίνης - συνδέονται με τυποποιημένο καλώδιο USB



Σημείωση: Εάν έχετε έναν διανομέα USB συνδεδεμένο στο Glooko Transmitter, ο διανομέας USB πρέπει να τροφοδοτείται από το δικό του τροφοδοτικό.



Equil/Wellion

MICRO-pump

Micro USB



Insulet

Omnipod® Dash™ System

Micro USB



Omnipod® System

Mini USB



1. Συνδέστε το DASH™ στο Transmitter με το καλώδιο USB-A σε Micro.
2. Πατήστε Εξαγωγή στο DASH™.
3. Αποσυνδέστε το DASH™ και συνδέστε το ξανά.
4. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση, το Glooko Transmitter θα εμφανίσει το μήνυμα 'Έγινε μεταφορά'.

Medtronic

630G | 670G
640G

Θύρα USB στον μετρητή

1. Συνδέστε έναν μετρητή Contour Next Link 2.4 στον πομπό Glooko Transmitter.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αποστείλετε δεδομένα από την αντλία Medtronic.

Roche

Accu-Chek Aviva Solo
Accu-Chek Guide Solo

Micro USB



1. Ανοίξτε το Κύριο μενού στη μονάδα χειρός για την αντλία.
2. Επιλέξτε USB στο Κύριο μενού.
3. Συνδέστε τη μονάδα χειρός στον πομπό Glooko με το καλώδιο Micro USB.

Tandem

t:flex | t:slim X2
t:slim | t:slim G4

Micro USB



Vicentra

Kaleido

Micro USB



Μεταβείτε στο κίτρινο μενού και επιλέξτε αποστολή δεδομένων.

Αντλίες ινσουλίνης - με υπέρυθρη σύνδεση



Για τις αντλίες Animas, βεβαιωθείτε ότι η αντλία έχει ανασταλεί και ότι η οθόνη είναι αναμμένη όταν αρχίζει η μετάδοση. Η οθόνη δεν χρειάζεται να παραμείνει αναμμένη καθ' όλη τη διάρκεια της μετάδοσης.

Κρατήστε την αντλία εντελώς ακίνητη και μην αφαιρέσετε την αντλία μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη: Έγινε μεταφορά!

Παράθυρο υπέρυθρων στο Glooko Transmitter



Animas

OneTouch Ping (pump)
Vibe
Vibe Plus



1. Αναστείλετε την αντλία. (**ΚΥΠΙΟ ΜΕΝΟΥ**, μετακινηθείτε στο **Suspnd/Resum** και πατήστε **OK**. Η επιλογή **Suspend** (Αναστολή) επισημαίνεται).
2. Πατήστε **OK**.
3. Τοποθετήστε την αντλία με το πίσω μέρος της στραμμένο προς το παράθυρο υπέρυθρων στο Glooko Transmitter.
4. Όταν ολοκληρωθεί η μετάδοση:
Συνεχίστε τη λειτουργία της αντλίας (**ΚΥΠΙΟ ΜΕΝΟΥ**, μετακινηθείτε στο **Suspnd/Resum** και πατήστε **OK**. Η επιλογή Resume (Συνέχιση) επισημαίνεται). Πατήστε **OK**.

Αντλίες ινσουλίνης - συνδεδεμένες με καλώδια υπερύθρων

Συμβατά καλώδια υπερύθρων


Καλώδιο Roche
Accu-Chek Smart Pix



Καλώδιο Roche
Accu-Chek Smart Pix 2



Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Performa Insight

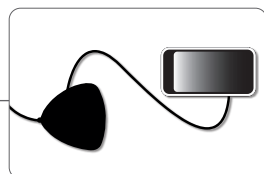

Smart Pix 2

Σημείωση! Συνδέστε τη συσκευή χειρός της αντλίας σας με ένα καλώδιο micro USB στο "Smart Pix 2".

1. Συνδέστε το καλώδιο Smart Pix 2 στο Glooko Transmitter και περιμένετε να αρχίσει να αναβοσβήνει αργά η μπλε ένδειξη στο Smart Pix 2.
2. Συνδέστε τη συσκευή χειρός στο Smart Pix 2 με ένα καλώδιο micro USB.
3. Στο μενού της συσκευής χειρός, επιλέξτε **Σύνδεση με υπολογιστή** και πατήστε **OK**.
4. Βεβαιωθείτε ότι η αντλία είναι εντός εμβέλειας της συσκευής χειρός.
5. Η μπλε ένδειξη στο Smart Pix 2 είναι αναμμένη όσο μεταδίδονται δεδομένα από τη συσκευή στο Smart Pix 2.
6. Η μπλε ένδειξη σβήνει και τόσο το Smart Pix 2 όσο και η συσκευή εκπέμπουν έναν ήχο για να δηλώσουν ότι γίνεται μετάδοση δεδομένων από το Smart Pix 2 στο Glooko Transmitter. Μην αποσυνδέσετε το Smart Pix 2 ακόμα!
7. Περιμένετε μέχρι το Glooko Transmitter να επιβεβαιώσει ότι η αποστολή ήταν επιτυχής.

Roche


Accu-Chek Spirit Combo



Smart Pix or Smart Pix 2
Note! Smart Pix software version 3.02 or higher is required when using Smart Pix.

1. Συνδέστε το Smart Pix με το Glooko Transmitter και περιμένετε μέχρι να ξεκινήσει να αναβοσβήνει αργά η μπλε ένδειξη στο Smart Pix.
2. Θέστε την αντλία σε **τρόπο λειτουργίας μεταφοράς δεδομένων** (διακόψτε τη λειτουργία της αντλίας και μεταβείτε στο **μενού μεταφοράς δεδομένων**).
3. Τοποθετήστε την αντλία με το παράθυρο υπερύθρων προς το Smart Pix. Η μπλε ένδειξη δηλώνει ότι τα δεδομένα μεταδίδονται στο Smart Pix.
4. Περιμένετε να αρχίσει ξανά να αναβοσβήνει αργά η μπλε ένδειξη ή να σταματήσει να αναβοσβήνει εντελώς.
5. Τα δεδομένα μεταδίδονται τώρα από το Smart Pix στο Glooko Transmitter. Μην αποσυνδέσετε ακόμα το Smart Pix!
6. Περιμένετε μέχρι το Glooko Transmitter να επιβεβαιώσει ότι η αποστολή ήταν επιτυχής.

Αντλίες ινσουλίνης - συνδεδεμένες με NFC

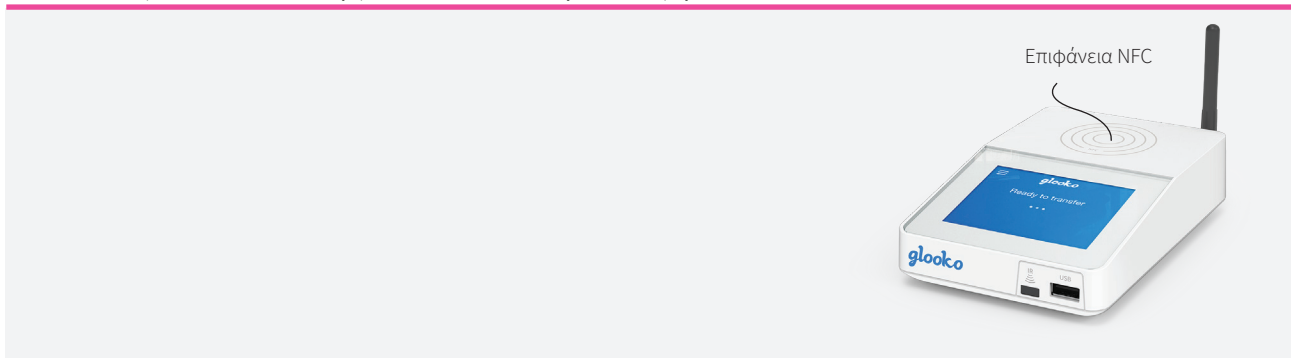


Terumo
Medisafe WITH



1. Βεβαιωθείτε ότι προβάλλεται το κύριο μενού στο τηλεχειριστήριο για την αντλία.
2. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στην επιφάνεια NFC που βρίσκεται στο πάνω μέρος του Glooko Transmitter και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Να σημειωθεί ότι το σύμβολο μετάδοσης στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με το κέντρο της επιφάνειας NFC του Glooko Transmitter.

Πένες ινσουλίνης - συνδεδεμένες με NFC

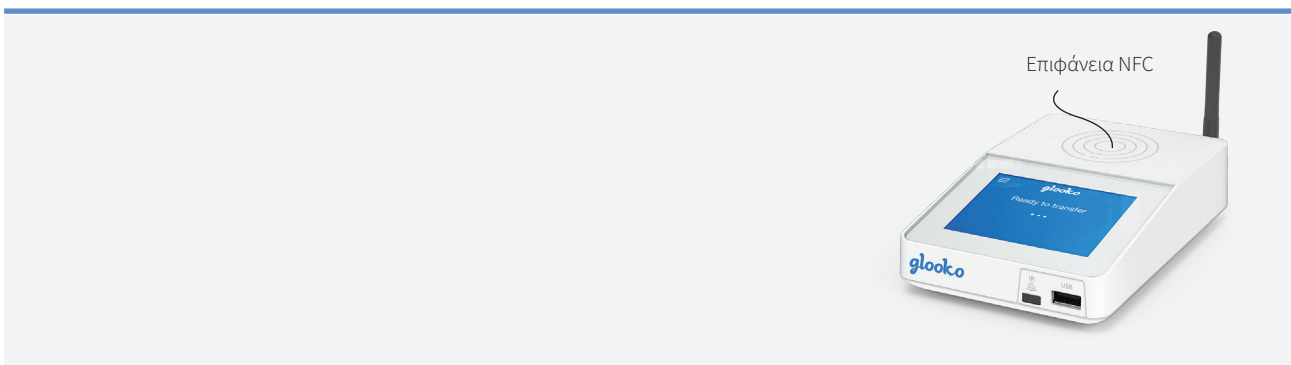

NovoNordisk
NovoPen® 6
NovoPen Echo® Plus





Τοποθετήστε τη συνδεδεμένη πένα στην επιφάνεια NFC πάνω από τον πομπό Glooko Transmitter και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν για πομπούς Glooko Transmitter με σειριακούς αριθμούς που ξεκινούν με 21 (π.χ. S21XXXXXX) ή μικρότερους αριθμούς (π.χ. S20XXXXXX, S19XXXXXX κ.λπ.).

Τεχνικές προδιαγραφές

Προστασία περιβλήματος	IP20 – Μόνο εσωτερική χρήση
GSM/GPRS	850/900/1800/1900 MHz
Θερμοκρασία λειτουργίας	°5C έως °40C
UMTS/HSPA	800/850/900/1700/1900/2100 MHz
Τροφοδοτικό	Είσοδος: 100–240V εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), 0,6A, 50/60 Hz
	Έξοδος: 12V συνεχές ρεύμα (DC), 2,0A, LPS

  Glooko AB
Nellieckenvägen 20
SE-412 63 Göteborg
SWEDEN

Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν για πομπούς Glooko Transmitter με σειριακούς αριθμούς μεταξύ 22000000 και 24079999.

Τεχνικές προδιαγραφές

Προστασία περιβλήματος	IP20 – Μόνο εσωτερική χρήση
CE	GPRS: 900/1800 MHz WCDMA: Band I/VIII LTE: Band 1/8
FCC	GPRS: 850/1900 MHz WCDMA: Band II/IV LTE: Band 2/4/5/12
Θερμοκρασία λειτουργίας	°5C έως °40C
Θερμοκρασία αποθήκευσης/μεταφοράς	-20 °C έως 70 °C
UMTS/HSPA	800/850/900/1700/1900/2100 MHz
Τροφοδοτικό	Είσοδος: 100–240V εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), 0,6A, 50/60 Hz
	Έξοδος: 12V συνεχές ρεύμα (DC), 2,0A, LPS



REF REF-0003

EC REP

MD

IP 20

Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

MedEnvoy Global B.V
Prinses Margrietplantsoen 33
- Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Τυχόν σοβαρό συμβάν που έχει προκύψει σε σχέση με τη συσκευή θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο εδρεύετε εσείς ή/και ο ασθενής σας.

Υποστήριξη

<https://support.glooko.com/hc/el>

Στοιχεία Επικοινωνίας Διανομέα:

Hemoglobe Hellas

Διεύθυνση: Ελληνικού Στρατού 3, Άνοιξη Αττικής, 14569 Ελλάδα

Εμειλ: support@hemoglobe15.com

Τεχνική Υποστήριξη: +30 217 000 9999

Εξυπηρέτηση πελατών: +30 210 8131 733 / +30 210 6215 792

Ιστοσελίδα: www.hemoglobe15.com

Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν για πομπούς Glooko Transmitter με σειριακούς αριθμούς που ξεκινούν με 2408 (π.χ. S2408XXXX) ή μεγαλύτερους αριθμούς (π.χ. S25XXXXXX).

Τεχνικές προδιαγραφές

Προστασία περιβλήματος	IP20 – Μόνο εσωτερική χρήση
GPRS, WCDMA, LTE	GPRS: 900/1800 MHz WCDMA: Band I/VIII LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/26/28/38/40/41
Θερμοκρασία λειτουργίας	°5C έως °40C
Θερμοκρασία αποθήκευσης/μεταφοράς	-20 °C έως 70 °C
UMTS/HSPA	800/850/900/1700/1900/2100 MHz
Τροφοδοτικό	Είσοδος: 100–240V εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), 0,6A, 50/60 Hz
	Έξοδος: 12V συνεχές ρεύμα (DC), 2,0A, LPS



REF-0003



Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

MedEnvoy Global B.V
Prinses Margrietplantsoen 33
- Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Τυχόν σοβαρό συμβάν που έχει προκύψει σε σχέση με τη συσκευή θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο εδρεύετε εσείς ή/και ο ασθενής σας.

Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν για πομπούς Glooko Transmitter στη χώρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Τεχνικές προδιαγραφές

Προστασία περιβλήματος	IP20 – Μόνο εσωτερική χρήση
GPRS, WCDMA, LTE	GPRS: 900/1800 MHz WCDMA: Band I/VIII LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/26/28/38/40/41
Θερμοκρασία λειτουργίας	°5C έως °40C
Θερμοκρασία αποθήκευσης/μεταφοράς	-20 °C έως 70 °C
UMTS/HSPA	800/850/900/1700/1900/2100 MHz
Τροφοδοτικό	Είσοδος: 100–240V εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), 0,6A, 50/60 Hz
	Έξοδος: 12V συνεχές ρεύμα (DC), 2,0A, LPS



REF-0003



Glooko AB
Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
SWEDEN

Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Τυχόν σοβαρό συμβάν που έχει προκύψει σε σχέση με τη συσκευή θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο εδρεύετε εσείς ή/και ο ασθενής σας.

Στοιχεία Επικοινωνίας Διανομέα:

Hemoglobe Hellas

Διεύθυνση: Ελληνικού Στρατού 3, Άνοιξη Αττικής, 14569 Ελλάδα

Εμειλ: support@hemoglobe15.com

Τεχνική Υποστήριξη: +30 217 000 9999

Εξυπηρέτηση πελατών: +30 210 8131 733 / +30 210 6215 792

Ιστοσελίδα: www.hemoglobe15.com

Υποστήριξη

<https://support.glooko.com/hc/el>